

Asiakastiedote 40/2018

11.9.2018

Arvoisa asiakas,**Uusi kvantitatiivinen tutkimus ulosteen veren osoittamiseen**

Tulemme korvaamaan nykyisen F –hHb-O kvalitatiivisen osoituksen uudella herkemällä kvantitatiivisella määrityksellä.


Uusi tutkimusnimike on F -Hemoglobiini, ihmisen, F –hHb (ATK 10673)

Menetelmämuutoksen myötä uusi näytteenottoväline tulee olemaan QuikRead FOB näyteputki. Uudet näytteenottovälineet ovat tilattavissa SYNLABin nettisivuilta www.synlab.fi/tarviketilaus tuotenumera 138822. Aikaisemmin käytössä olleet Actim Fecal Blood –näytteenotto-putket eivät sovellu uudelle menetelmälle.

Näyte:

Käyttämätön näyteputki säilytetään huoneenlämmössä (enintään 25°C:ssa). Älä käytä näytteenotto-putkia viimeisen käyttöpäivän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivä on merkitty näytteenotto-putkien etiketteihin muodossa vuosi-kuukausi.

1. Ota pieni määrä ulostetta puhtaaseen astiaan tai puhtaalle wc-paperille. Vältä koskemista wc:n veteen näytettä ottaessasi. Älä ota näytettä ripuliulosteesta tai ulosteesta, jossa näkyy verta, vaan jätä näytteenotto seuraavaan ulostuskertaan.
2. Kierrä auki näyteputken korkki, jossa on näytetikku. Kerää näyte näyteputken näytetikulla painamalla tikku saman ulostenäytteen kolmeen (3) eri kohtaan (kuva 1-2).
3. Aseta näytetikku takaisin näyteputkeen ja kierrä korkki tiukasti kiinni (kuva 3).
4. Kirjoita nimesi ja päivämäärä erikseen annettuun etikettiin ja kiinnitä etiketti näyteputkeen (kuva 4-5).
5. Näytteen lyhytaikainen säilytys huoneenlämmössä (enintään 25°C:ssa).
6. Suosittelemme näytteen säilytystä jääkaapissa. Säilyvyys jääkaapissa (+2-+8°C:ssa) 7 vuorokautta, tai huoneenlämmössä (enintään 25°C:ssa) 5 vuorokautta.
7. Näytteen lähetys huoneenlämmössä tai viileässä.

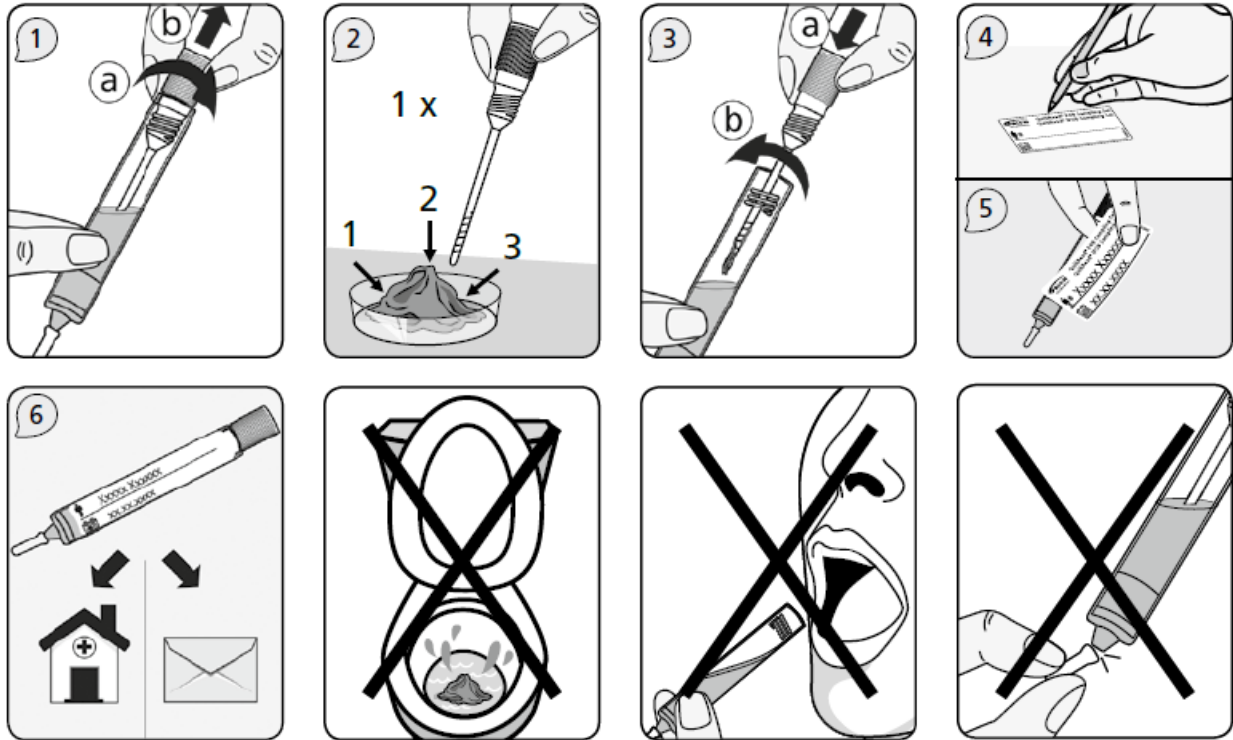

Menetelmä
Immunokemiallinen

Tekotiheys
Arkipäivisin, vastausviive 1-2 arkipäivää

Muutos astuu voimaan maanantaina **1.10.2018** alkaen.

Tiedustelut:

SYNLABin ammattilaisneuvonta
Puhelimitse: +358 20 734 1550
Sähköpostitse: ammattilaisneuvonta@synlab.fi