

Tiedote 11/2015**17.11.2015****Uusi näytteenottoväline, HPVnHO KL 4075****Arvoisa asiakas,**

Menetelmämuutoksen myötä siirrymme HPVnHO-tutkimuksessa uusiin näytteenottovälineisiin. Uudet näytteenottovälineet ovat Cervex-Brush Combi -harjapakkaus. Uudet näytteenottovälineet ovat tilattavissa synlabin nettisivuilta www.synlab.fi/tarviketilaus tuotenumera 52980C. Aikaisemmin käytössä olleet nyloniset nukkatikut eivät sovellu uudelle menetelmälle ja nämä tulee poistaa käytöstä.

Näyte:

HPV-näyte tulee ottaa ennen muita toimenpiteitä, pesuja tai penslauksia ja ennen sytologisen näytteen ottamista.

HPV-harjastikku työnnetään kohdunkaulakanavaan kevyesti painaen niin, että harjastikun kaikki sivusuuntaiset harjat ovat kosketuksissa kohdunsuun limakalvoa vasten. Harjastikkua pyöritetään kaksi kertaa myötöpäivään. Irrota ja jätä valkoinen harjasosa kuljetuspurkkiin. Sulje purkki tiivistä.

Näyte säilyy kuljetusnesteessä +2-30°C:ssa jopa 6 kuukautta.

Muutos astuu voimaan 1.12 alkaen, jolloin myös uudet näytteenottovälineet tulee ottaa käyttöön.

Tiedustelut:

Asiakaspalvelu: 020 734 1550

Email: asiakaspalvelu@synlab.fi