

## Näytteiden pakkaus- ja lähetysohje synlab Finland Oy/Tampere:

### Pienet näytteet 20 ml ja 60 ml formaliinipurkit

Laita näyte **purkkiin, jossa tunnistetiedot** ja kierrä formaliinipurkin korkki hyvin kiinni. Liimaa purkkiin viivakooditarra. Purkkien numerointi tarraan (esim. skopiat 1, 2, 3). Laita purkki minigrippussiin, jossa on imuliina.

ÄLÄ KÄYTÄ PAKKAAMISEEN TEIPPIÄ!

### Isot näytteet esim. rintaresekaatit

Laita näyte muoviastiaan (valitse koon mukaan **oikean kokoinen** astia mahdollisuuksien mukaan siten, että näyte ei rutistu). Lisää formaliinia vain sen verran, että näyte peittyy. Näytteen saavuttua laboratorioon *lisäämme formaliinia jokaiseen suureen näyteastiaan*. Laita näytteen päälle sellua tai käsipaperia, ettei formaliini hölsky. Älä kääri näytettä paperiin tai selluun.

Sulje kansi ja laita *parafilmia* kannen ja purkin sauman päälle, ettei astia vuoda kuljetuksen aikana. Pakkaa näyte sopivan kokoiseen pahvilaatikkoon. Purkki ei saa puristua koska silloin se vuotaa. Pahvilaatikon pohjalle ja sivuille voit laittaa imupaperiksi sellua, käsipaperia tai muuta vastaavaa.

**YLI KAHDEN KILON PAINOISILLE NÄYTTEILLE TILATAAN ERILLINEN KULJETUS. OTA YHTEYTTÄ ASIAKASPALVELUUMME TAI TAMPEREEN TOIMIPISTEESEEN, NIIN TILAAMME KULJETUKSEN.**

**KULJETUSTA EI KUITENKAAN TARVITSE TILATA, JOS NÄYTE LAITETAAN KAHTEN ERILLISEEN ESIM. PAHVILAATIKKON, SITEN ETTÄ YHDEN LAATIKON PAINO ON ALLE 2 KG. (TAMPEREEN LÄHETETUNNUKSEN VOI LEIKATA KELTAMUSTARAIDALLISESTA LAATIKOSTA )**

### PEG-etanolifiksatiivi purkit (vihreä korkki)

Laita näyte **purkkiin, jossa tunnistetiedot** ja kierrä korkki hyvin kiinni. Liimaa viivakooditarra purkkiin ja laita purkki minigrip pussiin, jossa on imuliina.

Näytteet lähetetään (>2kg painavia lkm:tta) keltamustaraidallisessa lähetyslaatikossa, jossa on Tampereen tunnus 5019980 33006 VASTAUSLÄHETYS tai mustassa Tampereen lähetyskoppassa.